


Instrucciones de preparación y envío de muestras OncoTRACE



Powered by OncoDNA

Las muestras de sangre serán extraídas en los **tubos Streck** (situados dentro de los tubos de plástico identificados con un código) que contienen una solución que estabiliza el ADN a temperatura ambiente. El protocolo para la extracción es el siguiente:

- 1) Extraiga la sangre por venopunción de acuerdo con las recomendaciones CLSI H3-A6.
- 2) Llene dos tubos Streck completamente.
- 3) Retire el tubo del adaptador e inmediatamente **mezcle por inversión suave entre 8 y 10 veces**. Una mezcla inadecuada o con retraso puede resultar en resultados imprecisos del test.

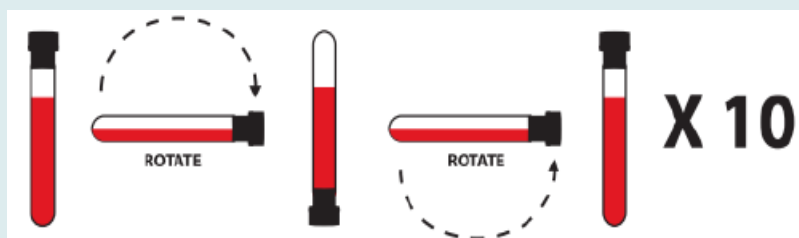

- 4) Tras la recolección, introduzca los tubos Streck en los tubos de plástico. (En la primera extracción se utilizarán los tubos con los códigos 1 y 2, en la segunda los tubos 3 y 4 y en la tercera y última los tubos 5 y 6).
- 5) Sitúelos en el pequeño sobre de burbujas que les proporcionamos. A continuación, sitúe este sobre dentro del sobre UN3373 y ciérrelo.
- 6) Introduzca el sobre cerrado UN3373 en el sobre de DHL y ciérrelo también.
- 7) Rellene el albarán de DHL con los datos que se indican con un círculo y póngalo en la bolsa de plástico situada en el lateral del sobre DHL.
- 8) **Por último**, comuníquese con **BioSequence** en info@bio-sequence.com o llamando al **+34 961 829 423** para informarnos de que las muestras están listas y un mensajero pasará a recogerlas para enviarlas por correo urgente.

NOTA: Realizar la extracción de lunes a miércoles para garantizar la recepción de la muestra por el laboratorio en la misma semana de la extracción. Pacientes en tratamiento con quimioterapia intravenosa, radioterapia, o que se hayan sometido a una biopsia, esperar entre 10-14 días antes de tomar la muestra.

Por favor asegúrese de que se cumplen los criterios mencionados. Estas directrices son cruciales para asegurar la mejor calidad de resultados para sus pacientes. Si no está familiarizado con ellas, por favor contáctenos directamente.

Contenido del kit

-6 **tubos streck** dentro de **6 tubos de plástico** identificados con un código alfanumérico seguido de un número del 1 al 6.

-**3 sobres de burbujas** para introducir los tubos de plástico identificados.

-**3 sobres UN3373** para introducir los sobres con burbujas en los que van los tubos.

-**3 albaranes y 3 sobres de DHL** para realizar el envío de las muestras al laboratorio.

Importante

Cada kit está asociado a un código y éste a su vez está asociado a un único paciente, por lo que es **muy importante** que una vez se haya enviado el primer análisis OncoTRACE, todos los tubos **restantes** sean usados **únicamente para ese paciente**.

Para evitar cualquier intercambio de kits de dos pacientes diferentes, consideramos que lo más adecuado es que el propio paciente guarde su kit él mismo y que lo haga durante todo el estudio OncoTRACE. Las únicas precauciones que tiene que tener el paciente es **mantener el kit a temperatura ambiente y llevarlo con él a cada consulta con el oncólogo**.

Por supuesto, si el oncólogo decide guardar el kit OncoTRACE en el hospital, él será **totalmente responsable** de asegurar que no hay intercambios y que el kit correspondiente es usado para el paciente indicado.