

Requisitos de las muestras e Información de envío

BioSeq Predisposición requiere una muestra de sangre del familiar con la mutación conocida y una muestra de sangre del familiar a diagnosticar:

Tipo de muestra: **Sangre**

Requisitos: Extraer sangre en un tubo con EDTA (tapón violeta) y enviar 10 mL (Adultos/Niños) y 3 ml (Niños<2 años).

Condiciones de Envío: Enviar a temperatura ambiente en un recipiente aislado que BioSequence le envíe: proporcionará por correo urgente. No calentar ni congelar.

Tipo de muestra: **Otros**

Requisitos: Contacte con BioSequence para consultar si se puede aceptar otro tipo de muestra.

Instrucciones de Embalaje (Muestras a T°C ambiente)

Las muestras para diagnóstico deben embalarse tal y como se detalla a continuación.

1. Recoger las muestras para diagnóstico en su recipiente y sellar herméticamente:

- Sangre: 1 tubo EDTA

2. Rotular en la etiqueta blanca:

- Iniciales del paciente
- Número de historia clínica
- Fecha y hora de toma de muestra

3. Envolver el recipiente con la muestra en papel aislante.

4. Colocar la muestra asilada en el sobre de MRW que le entregará el mensajero.