

### Requisitos de las muestras e Información de envío

Esta herramienta requiere de ADN obtenido mediante biopsia tumoral o resección quirúrgica:

Tipo de **Bloque tumoral FFPE (Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded)**  
muestra:

**Requisitos:** El bloque debe contener suficiente cantidad de tejido tumoral fijado en formaldehído y embebido en parafina (FFPE) procedente de resección quirúrgica. Por favor, **incluya una copia del correspondiente informe de patología quirúrgica.**

Temperatura de transporte: enviar entre 20-25°C. Proteger el tejido en parafina del calor excesivo. Enviar en recipiente refrigerado en los meses de verano.

Condiciones inaceptables: Si no hay tumor en el tejido. Muestras congeladas y muestras fijadas/procesadas con fijadores alternativos.

Estabilidad: Ambiente Indefinidamente; Refrigeración: Aceptable.

Condiciones de Envío: Enviar a temperatura ambiente (20-25°C) en un recipiente aislado por correo urgente que BioSequence le proporcionará. No calentar ni congelar.

Contactar con **BioSequence** al teléfono **96 182 94 23** o **673 014 705** para que envíen un **mensajero** a recoger la muestra.